

# Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

## Größenberater in nur 3 Schritten zur richtigen Größe.

### Schritt 1

Stellen Sie den rechten Fuß in Strümpfen auf die vorgedruckte Fußsohle.


**Wichtiger Hinweis:** Positionieren Sie Ihren Fuß so, dass die Ferse am Pfeilende ansetzt.

### Schritt 2

Markieren Sie mit einem Stift auf der Schablone die längste Stelle des Fußes.

#### Bitte beachten Sie:

Damit Sie keinen verkleinerten Ausdruck bewirken, muss diese Datei in Originalgröße ausgedruckt werden! Im Druckmenü bei den Seiteneinstellungen bitte Folgendes auswählen: „**Seitenanpassung: keine**“.

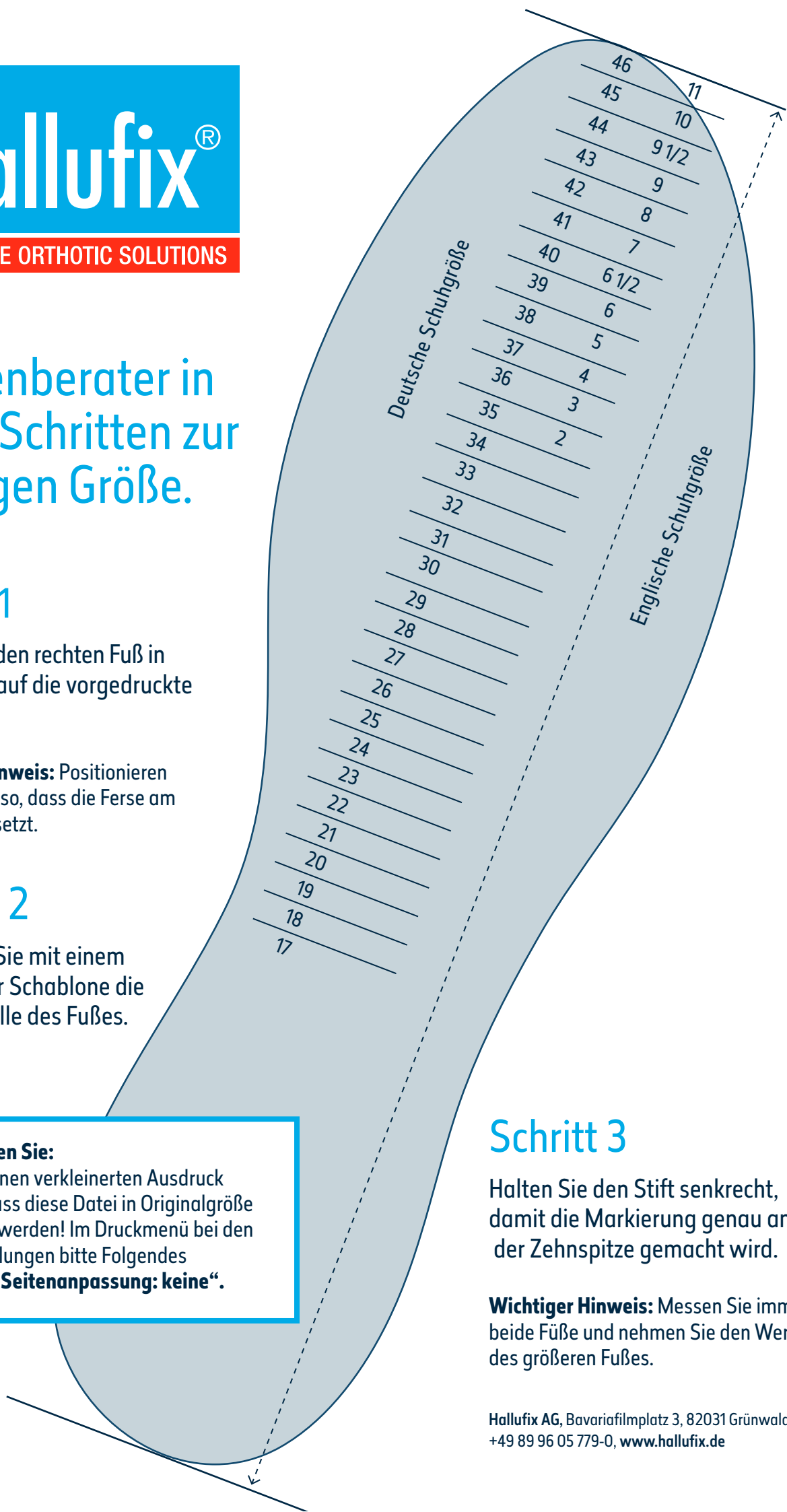

### Schritt 3

Halten Sie den Stift senkrecht, damit die Markierung genau an der Zehnspitze gemacht wird.

**Wichtiger Hinweis:** Messen Sie immer beide Füße und nehmen Sie den Wert des größeren Fußes.

Hallufix AG, Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald,  
+49 89 96 05 779-0, [www.hallufix.de](http://www.hallufix.de)